



Avsändarens adress:	Patientens namn och personnummer:
Fakturaadress:	Organisationsnummer:

Läkare:

Diagnos:

Provtagningsdatum:

Datum för senaste dos:

Tidpunkt för provtagning:

- Före första infusionen
- Före 3-månadersinfusionen
- Före 6-månadersinfusionen
- Före 12-månadersinfusionen
- Före 24-månadersinfusionen
- Ev annan tidpunkt:.....

- Behandling avslutad sedan (ange i månader):.....

Anledning till provtagning:

- Rutinkontroll
- Misstänkt överkänslighet mot Tysabri
- Tidigare positivt prov
- Försämring
- Annan orsak:.....

Provet kommer att sparas i en biobank.

Proverna skickas till: Provinlämningen L7:00
Karolinska Universitetslaboratoriet
17176 Stockholm

Provtagningsinstruktioner, se remissens baksida!

Provtagning för analys av neutraliserande antikroppar mot Tysabri (natalizumab)

Serum

- Prov tas just innan Tysabri-infusion (dvs. 4 veckor efter föregående dos)
- 10 ml blod tas som en venpunktion i serumrör
- Skall centrifugeras inom 1 timme vid 3000 rpm i 10 min
- Efter centrifugering skall minst 1-2 ml föras över i sterilt polypropylen rör och frysas i -20°C
- Förvaras i -20°C i väntan på transport.

Transport

- Provet måste sändas fryst med torris (se till att frigolitlådan är fylld med is)
- Laboratoriet tar endast emot prover som skickats må-torsdag och alltså kommer till laboratoriet under kontorstid och ej i anslutning till helg.
- Vid frågor var vänlig kontakta:

Anna G Mattsson, tel: 08-517 702 58, Anna.G.Mattsson@ki.se
Elin Karlberg, tel: 08-517 702 58, Elin.Karlberg@ki.se
Docent Anna Fogdell-Hahn, tel: 08-517 702 51, Anna.Fogdell-Hahn@ki.se

Prover skickas till:

Provinlämningen L7:00
Karolinska Universitetslaboriet
17176 Stockholm